

BENUTZUNG NUR UNTER AUFSICHT EINER BETREUUNGSPERSON !

MIT ALLEN DETAILS VERTRAUT MACHEN

Bitte machen Sie sich als Benutzer oder Aufsichtsperson mit allen Details des Trage-Systems vor der ersten Benutzung vertraut (A). Betrachten Sie sich die verschiedenen Verschluss- und Einstellmöglichkeiten. Entwickeln Sie ein Gefühl für die Spannung der Gummibänder und der Druckknöpfe.

TESTLAUF OHNE ZUGÄNGE (INFUSIONSSYSTEME)

Die erstmalige Benutzung des Systems sollte OHNE ZUGÄNGE (ohne Einbindung des Infusionssystems) erfolgen und dient lediglich dem Anpassen der Träger/Gurtbänder um die Brust-/Bauchform. Bitte achten Sie z.B. bei kleineren Kindern auf eine entspannte, ruhige Umgebung ohne Ablenkung und ohne Zeitdruck.

ANZIEHEN DES TRAGE-SYSTEMS


Zum Anziehen des Trage-Systems befestigen Sie zwei Träger/Gurtbänder an einer Seite des Brustbeutels und legen Sie das Katheterschlauchende lose auf das geöffnete koalabag (B/C). Führen Sie den oberen Träger/Gurtband schräg über die Schulter zum Brustbeutel und befestigen Sie ihn am Druckknopf (D). Führen Sie den unteren Träger/Gurtband waagrecht über den Rücken zum Bauch und befestigen Sie ihn am Druckknopf der Tasche (E). Korrigieren Sie ggfls. die Zugspannung der Träger/Gurtbänder. Die Träger/Gurtbänder sollen unter leichtem Zug anliegen und KEINE Druckstellen verursachen.

EINBINDUNG DES INFUSIONSSYSTEMS IN DEN BRUSTBEUTEL

Legen Sie das Infusionssystem in den geöffneten Brustbeutel (C). Bitte achten Sie darauf, dass der Schutzverband des Infusionssystems komplett in dem Beutel liegt, damit ein Verschmutzen von außen verhindert wird. Führen Sie die Infusionsschläuche seitlich aus dem Beutel heraus (D/E). Überprüfen Sie die Lage des Katheters auf Knickstellen (Okklusion). Danach schließen Sie die Druckknöpfe der Tasche (F).

Achtung!

- Überprüfen Sie den Verlauf des Infusionsschlauchs auf Zug!
- Korrigieren Sie ggfls. den Sitz des Brustbeutels und Träger nach oben (G).
- Vor dem Gebrauch ist eine SPRÜHDESINFEKTION (H) der koalabag Tasche durchzuführen! Sprühen Sie hierbei die komplette Innenseite des Beutels, ebenso alle innenliegenden Elemente aus.
- Beachten Sie die vorgeschriebene Einwirkzeit.
- Reiben Sie die koalabag Tasche mit einer sauberen Kompresse trocken.
- Danach legen Sie das Infusionssystem in die Tasche.

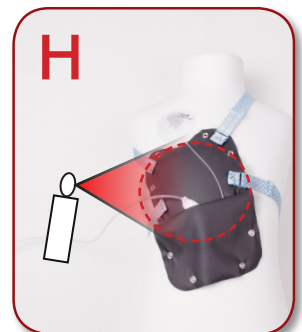

FERTIG Unser koalabag - Team wünscht Ihnen alles Gute!!!



Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde !

Mit der Entscheidung für dieses in Deutschland handgefertigte Trage-System möchten wir uns bei Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und den Erwerb des Produkts bedanken.

Der korrekte Gebrauch des Systems ist sowohl für die Sicherheit, als auch den gewünschten Erfolg unabdingbar. Bitte lesen Sie daher vor der ersten Benutzung die Hinweise der vorliegenden Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Da sich das Trage-System in direktem Körper- bzw. Hautkontakt mit dem Anwender befindet, befolgen Sie bitte alle aufgeführten Pflegehinweise. Gleichfalls wird dadurch die Haltbarkeit des Produkts positiv beeinflusst.

PFLEGEHINWEISE

MASCHINENREINIGUNG

Hygiene steht bei der Anwendung dieses Produktes immer im Vordergrund. Bitte waschen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch gründlich. Die Maschinenreinigung der kleinen Tasche bei 60°C mit einem milden Reinigungsmittel ist möglich. Keine kräftigen, aggressiven Reinigungsmittel (chemische Reinigung) verwenden, um z.B. spätere Hautirritationen bei darauffolgendem Gebrauch auszuschließen. Das gereinigte System nicht heiß bügeln und auch nicht im Wäschetrockner trocknen. Im täglichen Gebrauch ist das Produkt pfleglich und sorgsam zu behandeln. Alle sichtbaren Verschmutzungen (Ausscheidungen/Blut/Nahrungsreste etc.) sind restlos zu entfernen.

SPRÜHDESINFEKTION

Die saubere Brusttasche ist innenseitig nochmals vor und nach jeder Versorgung mittels Sprühdeseinfektion zu reinigen. Hierzu ist der Beutel oberseitig zu öffnen. Alle sichtbaren Komponenten innerhalb des Beutels sind auszusprühen. Die Sprühdeseinfektion kann während des Tragezustands durchgeführt werden. Die notwendige Einwirkzeit des jeweiligen Desinfektionsmittels (siehe Beipackzettel, Herstellerangabe) sind zu beachten. Reiben Sie die Innentasche nach der Einwirkzeit mit einer sauberen Komresse trocken.

ANWENDUNG / SICHERHEIT

Generell ist vor jedem Gebrauch der einwandfreie Zustand aller Komponenten zu prüfen. Das Trage-System ist aus hygienischen Gründen nicht übertragbar. Nach dem sorgfältigen Schließen aller Druckknöpfe ist eine optimale Sicherung des zentralen Systems gegeben. Das Trage-System ist ausschließlich für die angegebene Indikation zu verwenden. Der zweckentfremdete Einsatz ist untersagt!

PRODUKTQUALITÄT

Das koalabag Trage-System unterliegt den europäischen Sicherheitsanforderungen, den CE-Richtlinien, als auch den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG. Die Herstellung unterliegt ständigen Qualitätskontrollen. Alle verwendeten Materialien sind hinsichtlich Hautverträglichkeit geprüft und zertifiziert.

AUFSICHTSPFLICHT

Lassen Sie Benutzer -insbesondere Kleinkinder- während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt.

ACHTUNG NUTZUNGSVERBOT

Verwenden Sie das Trage-System nur, wenn sich dieses in einwandfreiem Zustand befindet! Sofern für das Produkt eine oder mehrere der nachfolgenden Kriterien eintreffen ist die weitere Nutzung des Produkts untersagt oder das Produkt zu ersetzen:

- Belastung der Hautstellen (Druckstellen) durch zu kurze Gurtbänder
- Mangelnder hygienischer Zustand
- Starker Abnutzungsgrad wegen hoher Tragehäufigkeit
- Gerissene Stoffelemente, Bänder oder sich ablösende Kleinteile (Verschlussgefahr!), offene Nähte

Wenden Sie sich bei Mängeln unverzüglich an Ihren Fachhändler!

KONTAKTDATEN



bajula
Maren Petrowsky
Abteilung: koalabag
Mozartstr.18
67824 Feilbingert
Mobil: 0151 20 19 38 22
E-Mail: info@bajula.de
Internet: www.koalabag.de
www.bajula-shop.de