



BEISPIEL FÜR MODEL A



BEISPIEL FÜR MODEL B



BEISPIEL FÜR MODEL C

VIELEN DANK!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Mit der Entscheidung für das in Deutschland handgefertigte bajula® Hörhilfen-Trage-System möchten wir uns bei Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und den Erwerb des Produkts bedanken. Der korrekte Gebrauch des Hörhilfen-Trage-Systems ist sowohl für die Sicherheit, als auch den gewünschten Hörerfolg unabdingbar. Bitte lesen Sie daher vor der ersten Benutzung die Hinweise der vorliegenden Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Da sich das Hörhilfen-Trage-System in direktem Körper- bzw. Hautkontakt mit dem Anwender befindet, befolgen Sie bitte alle aufgeführten Pflegehinweise. Dadurch wird ebenfalls die Haltbarkeit des Produkts positiv beeinflusst.

PFLEGEHINWEISE / REINIGUNG

Bitte waschen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch. Reinigung des Stirnbands per Handwäsche mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser. Keine kräftigen, aggressiven Reinigungsmittel (chemische Reinigung) verwenden, um z.B. spätere Hautirritationen bei darauffolgendem Gebrauch auszuschließen. Das gereinigte Stirnband nicht heiß bügeln und auch nicht im Wäschetrockner trocknen. Nur so kann die Passform für lange Zeit optimal gewährleistet werden. Im täglichen Gebrauch ist das Produkt pfleglich und sorgsam zu behandeln. Es ist auf einen genauen Sitz zu achten!



ANWENDUNG / SICHERHEIT

Generell ist vor jedem Gebrauch der Kopfschutz auf einen einwandfreien Zustand zu prüfen.

Das Hörhilfen-Trage-System soll nur von einem einzigen Benutzer getragen werden!

Vor jeder Benutzung ist der Kopfschutz auf die richtige Passform zu prüfen und ggfls. im Bereich der optional erhältlichen Kreuz-Kopfbänder bzw. des Kinnbands nachzustellen! Das sorgfältige Schließen der Klett-/Flauschverschlüsse garantiert ein unbeabsichtigtes Öffnen während der längeren Benutzung.

Das bajula® Hörhilfen-Trage-System ist ausschließlich für die angegebene Indikation zu verwenden. Der zweckentfremdete Einsatz ist untersagt! Unter der Maßgabe eines verbesserten Hör- und damit verbundenen Lernerfolgs lagern Sie das Trage-System auch bei Nichtgebrauch immer griffbereit, vorzugsweise an derselben Stelle in der Nähe des Benutzers. Nur so kann gerade im Alltag ein schnelles, situationsbedingtes Anlegen des Trage-Systems sichergestellt werden.

PRODUKTQUALITÄT

Das bajula® Hörhilfen-Trage-System unterliegt den europäischen Sicherheitsanforderungen, den CE-Richtlinien, als auch den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG. Die Herstellung unterliegt ständigen Qualitätskontrollen. Alle verwendeten bajula® Materialien sind zertifiziert und orientieren sich an aktuell geltenden Richtlinien hinsichtlich Hautverträglichkeit.

AUFSICHTSPFLICHT

Lassen Sie Benutzer insbesondere Kleinkinder während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt. Halten Sie den Kopfschutz immer außer Reichweite von Unbefugten!

ACHTUNG NUTZUNGSVERBOT

Verwenden Sie den Kopfschutz nur, wenn sich dieser in einwandfreiem Zustand befindet! Sofern für das Produkt eine oder mehrere der nachfolgenden Kriterien eintreffen ist die weitere Nutzung des Produkts untersagt oder das Produkt zu ersetzen:

- Mangelnde Passform, z.B. durch Kopfwachstum oder veränderte Kopfform
- Starke Belastung des Kopfes durch zu kurze oder zu eng anliegende Bänder
- Mangelnder hygienischer Zustand
- Starker Abnutzungsgrad wegen hoher Tragehäufigkeit
- Gerissene Stoffelemente, Bänder oder abgelöste Kleinteile (Verschluckungsgefahr!)

Wenden Sie sich bei Mängeln unverzüglich an Ihren Fachhändler!

KONTAKTDATEN



bajula®

Maren Petrowsky

Mozartstraße 18

67824Feilbingert

Mobil: 0151 20 19 38 22

E-Mail: info@bajula.de

Internet: www.bajula.de



MIT ALLEN BAJULA® DETAILS VERTRAUT MACHEN

Bitte machen Sie sich als Benutzer oder Aufsichtsperson selbst mit allen bajula®-Details vor der ersten Benutzung vertraut. Entwickeln Sie z.B. durch mehrmaliges Auseinanderziehen des Stoffs ein Gefühl für die Stoffspannung. Öffnen und schließen Sie die Klett-/Flausch bänder, um das Gespür für deren Handhabung und Zugfestigkeit zu bekommen.

TESTLAUF OHNE AUDIOPROZESSOR

Die erstmalige Benutzung des bajula® Systems sollte OHNE AUDIOPROZESSOREN erfolgen und dient lediglich dem Anpassen des Stirnbandes an die Kopfform. Bitte achten Sie z.B. bei kleineren Kindern auf eine entspannte, ruhige Umgebung ohne Ablenkung und ohne Zeitdruck.

TIPPS ZUM ANZIEHEN

Zum Anziehen legen Sie das bajula® System mit der Vorderseite an der Stirn des Benutzers an (A). Ziehen Sie daraufhin mit beiden Händen das Stirnband sowie die seitlichen Überlappungen langsam bis an den Hinterkopf (Nackenberg) des Benutzers (zu B). Siehe auch Videodatei unter www.bajula.de Tipp: Lange Haare vor dem Anziehen des Stirnbandes nach hinten legen.

OPTIMALER STIRNBANDVERLAUF

Der vordere Teil des Stirnbandes soll unter leichter Spannung mittig über die Stirn verlaufen und weder die Augenbrauen, noch den Haaransatz verdecken. Der rückseitige Teil des Stirnbandes soll entlang des Hinterkopfes verlaufen und nicht in den Nacken rutschen bzw. den Halsbereich verdecken. Der beidseitig eingearbeitete Netzstoff soll die Ohrmuscheln (inkl. der Hörhilfe) überdecken. Stirnband soll faltenfrei anliegen.

VERSCHLUSSREIHENFOLGE UND LÄNGENEINSTELLUNG BEACHTEN

Vorne (Stirnband) angenähtes Kopfband (bei C) nach hinten über die Mitte des Kopfes legen, durch die kleine Schlaufe fädeln und danach die Klett-/Flauschverbindung schließen (bei D). Seitlich angenähtes Band im Bereich der Ohren über die Mitte des Kopfes legen und in die gegenüberliegende Schlaufe einfädeln (bei E). Dieses Band überlappt das vordere Kopfband (C).

Ggfls. müssen einzelne Bänder z.B. nach einem Waschgang nachgestellt werden. Bänder sollen OHNE DRUCK anliegen. Die Prüfung des Kopfes auf Druckstellen muss nach jeder Benutzung erfolgen. Zeigt sich an einer Stelle eine Hautrötung muss der entsprechende Bandbereich neu eingestellt (bzw. „gelockert“) werden.

ANLEGEN DES STIRNBANDS MIT DEN AUDIOPROZESSOREN

Einfädeln der Audioprozessoren in die jeweiligen seitlichen Gummischlingen. Gummischlinge zusammenziehen, sodass der Audioprozessor nicht mehr herausfallen kann (bei F). Audioprozessoren einschalten und Funktion (Akustik und Batterie) überprüfen. Aufziehen des bajula® Stirnband über den Kopf des Anwenders (siehe Anleitung oben). Seitlichen Netzstoff nach oben klappen und die mit Gummischlaufe gesicherten Audioprozessoren richtig positionieren. Seitlichen Netzstoff nach unten klappen.

Zuletzt ist das Kinnband zu verschließen (bei G).

FERTIG Unser bajula® - Team wünscht Ihnen viel Erfolg.

BENUTZUNG BEI KLEINKINDERN NUR UNTER AUFSICHT!